

En CASO SOSPECHOSO de Influenza Humana de origen en virus de la Influenza A H1N1 nuevo subtipo

## RECUERDE !!!

### 1 Implementar las medidas de bioseguridad:

- Mascarilla N95
- Bata
- Guantes
- Gafas

### 2 Para recolectar la muestra tenga en cuenta

- ✓ Utilizar hisopos de algodón, poliéster o nylon y el medio de transporte viral **MTV**
- ✓ Si utiliza hisopos con mango de madera, escurrir el hisopo contra las paredes del tubo y eliminarlo una vez recolectada la muestra.
- ✓ Si no tiene disponible medio MTV, utilizar solución salina estéril (NaCl 0,85%)



#### Rotule el vial

- ✓ Nombre y apellidos
- ✓ Fecha de toma
- ✓ Hora de toma

### 3 Se DEBEN Recolectar las siguientes muestras:

1. Hisopado faríngeo (detrás de las amígdalas hacia la nasofaringe)
2. Aspirado nasofaríngeo (solo para paciente hospitalizado)




### 4 Utilizar el triple empaque para el envío de la muestra

**Primario:** vial de la muestra

**Secundario:** Recipiente que contiene el vial **enrollado en papel absorbente**

**Terciario:** nevera de Icopor con pilas refrigerantes

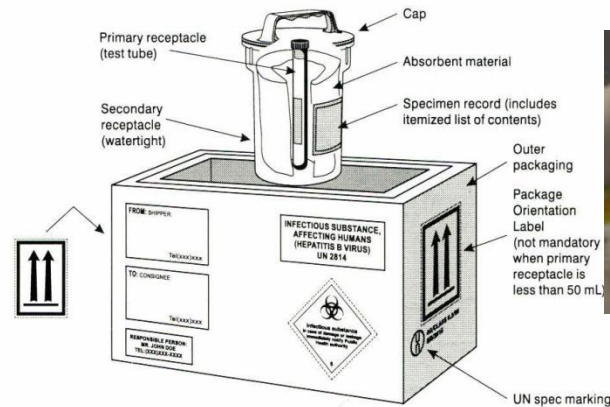

**Y OJO ANEXAR POR FUERA de la caja:**

- ✓ la Ficha notificación
- ✓ la Historia clínica (asociada solamente al evento)

**Contactos: INS, Grupo de Virología**  
Tel.: (57+1) 220 7700, ext 439, 443  
em@il: [influenza@ins.gov.co](mailto:influenza@ins.gov.co)  
Avenida (calle) 26 No 51-20, CAN  
Bogotá D.C